

Contour[®] plus

Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea



JÁ
CÓDIFICADO

Segunda-Chance
de teste

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA


Seu medidor CONTOUR[®]PLUS



Use somente as Tiras de Teste CONTOUR[®]PLUS

Extremidade Quadrada Cinza: Insira a tira de teste com a extremidade cinza voltada para cima.

Entrada da Amostra: Amostra de sangue absorvida nesta extremidade.

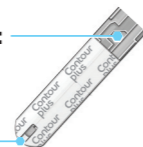

Consulte o Manual do Usuário do CONTOUR[®]PLUS e o encarte da embalagem do lancetador para obter instruções completas.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Sempre lave e seque bem as mãos com água e sabão antes e depois do teste e da manipulação do medidor, do lancetador ou das tiras de teste.


CUIDADO: O lancetador fornecido com o kit é indicado para autoteste por um único paciente. Não deve ser usado em mais de uma pessoa devido ao risco de infecção.

Teste Básico - Pontas dos Dedos


1. Remova a tampa do lancetador.
2. Segure a lanceta MICROLET[®] e gire a tampa protetora ¼ de volta, sem retirá-la.



3. Insira a lanceta firmemente no lancetador até que pare por completo.

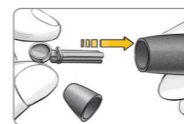


4. Gire e retire a tampa redonda de proteção da lanceta.

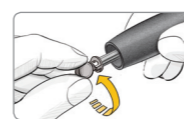


5. Recoloque a tampa.



6. Gire a rosca da tampa cinza para ajustar a profundidade de punção preferida.

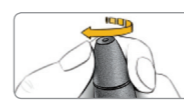

7. Insira a extremidade cinza da tira de teste na entrada da tira no medidor.

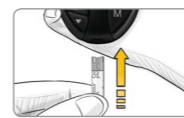

O medidor ligará e a imagem de uma tira de teste com uma gota de sangue piscando aparecerá na tela do medidor. O medidor agora está pronto para o teste.

8. Pressione firmemente o lancetador no local da punção e, em seguida, pressione o botão de disparo.



Aperte sua mão e seu dedo na direção do local da punção para formar uma gota de sangue.

9. Imediatamente toque a ponta da tira de teste na gota de sangue. Mantenha a tira de teste na gota de sangue até que o medidor emita bipes.



Teste na ponta do Dedo

Se a primeira gota de sangue não for suficiente, o medidor soará duas vezes. Você terá cerca de 30 segundos para aplicar mais sangue à mesma tira. Seu resultado será exibido após uma contagem regressiva de 5 segundos.

10. Para desligar o medidor, remova a tira de teste.



Descarte a tira de teste como lixo hospitalar, ou conforme recomendado por profissionais de saúde.

CUIDADO:

- O lancetador fornecido com o seu kit não é adequado para uso por profissionais de saúde. Não deve ser usado em mais de uma pessoa devido ao risco de infecção.
- Para retirar a lanceta do lancetador, consulte as instruções detalhadas no encarte da embalagem do lancetador.
- A imagem do lancetador é para fins de ilustração apenas.

Caso precise de ajuda, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor do seu país.

Consulte a contracapa do manual do usuário para ver as informações de contato.
www.diabetes.ascensia.com

⚠️ ATENÇÃO: Perigo Biológico Potencial

Todas as partes do kit são consideradas contaminantes.

Profissionais de saúde ou pessoas que usam este sistema em vários pacientes devem seguir o procedimento de controle de infecção preconizado pelo serviço de saúde.

Todos os produtos ou objetos que entram em contato com sangue humano, mesmo após limpeza, devem ser tratados como se pudessem transmitir doenças infecciosas.

O usuário deverá seguir as recomendações para prevenção de doenças transmissíveis pelo sangue em ambientes hospitalares, conforme potencial de risco.

Para obter informações sobre patentes e licenças relacionadas, consulte www.patents.ascensia.com

© 2019 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Todos os direitos reservados.

Ascensia, o logotipo Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts e o logotipo No Coding (Já Codificado) são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Como Usar no Modo Avançado

Como Configurar seu Medidor para o Modo Avançado

Para configurar seu medidor para o modo avançado e ter vantagens com os marcadores de refeição e outros recursos disponíveis:

1. Pressione **M** para ligar seu medidor.
2. Pressione e segure **▲** ou **▼** por 3 segundos.
3. L-1 piscará.
4. Pressione **▲** ou **▼** para mudar para L-2.
5. Pressione **M** para configurar.




Caso precise de ajuda, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor do seu país.

Consulte a contracapa do manual do usuário para ver as informações de contato. www.diabetes.ascensia.com

Depois de realizar um teste e visualizar os resultados, use os marcadores no monitor:


Para Marcar Resultados >	Você Verá >	Para Configurar >	Você Verá >	O Que Significa >
Pré-Refeição marca um resultado de teste efetuado antes de uma refeição. Pressione ▲ or ▼ .	 (Piscando)	Pressione M		O resultado é marcado como teste antes da refeição. Pressione M novamente para definir um lembrete de realizar teste depois da refeição.
Pós-Refeição marca um resultado de teste efetuado após uma refeição. Pressione ▲ or ▼ .	 (Piscando)	Pressione M		O resultado será marcado como teste depois da refeição.
Livro de Registros marca qualquer resultado como sendo único, ou diferente de alguma maneira. Pressione ▲ or ▼ .	 (Piscando)	Pressione M		O resultado será marcado na memória como único. Você deverá anotar essa informação em seu livro de registros.

 Define um lembrete (pré-fixado em 2 horas) para efetuar um teste depois da refeição. Consulte o manual do usuário para obter instruções completas sobre como usar os marcadores e ajustar os tempos de lembretes.

Como Usar o Lembrete




Quando o lembrete soar, o medidor será ligado e você verá o resultado do teste efetuado antes da refeição.

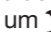

Pressione qualquer botão uma única vez para silenciar o lembrete e duas vezes para desligar o medidor. Faça outro teste de sangue e marque-o com um  marcador de teste depois da refeição (veja o gráfico à esquerda).

Códigos e Símbolos de Erros

Consulte o manual do usuário para obter a lista completa.

E1 	Temperatura fora da faixa.
E2 	Houve um problema no preenchimento completo da tira de teste. Teste novamente usando uma nova tira de teste.
E3 	O medidor detectou uma tira de teste usada, ou uma solução controle errada foi utilizada. Teste novamente usando uma nova tira de teste.
E11	Resultado anormal. Teste novamente usando uma nova tira de teste.

Fabricado por:
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

Importado e Distribuído por:
Nutriport Comercial Ltda
CNPJ: 03.612.312/0001-44
Rua Professor Serafim Orlandi,
356 - Vila Mariana - São Paulo/SP
CEP: 04115-090
SAC: 0800-878-7810
Resp. Técnica: Fernanda Soares Makuda
CRF-SP: 81.203
Registro ANVISA N°: 80190770006
E-mail: support@contournext.com

 **ASCENSIA**
Diabetes Care



2797
www.diabetes.ascensia.com

90005437
Rev. 11/19